



## Anleitung zur Benutzung einer Stimmgabel

- Stimmgabel aus Poly-Beutel nehmen.
- Das Anschlagen der Stimmgabel sollte möglichst am Handballen oder an einem Holz- oder Kunststoffstück, keinesfalls an zu harten Gegenständen (z.B. Blech, Stahl oder Stein) erfolgen. Hierbei ist es wichtig, daß der Schlag kurz und federnd ausgeführt wird, d.h. die Stimmgabel nur ganz kurz berührt wird. Die Schwingungsdauer des Tones erreicht durch dieses kurze Anschlagen eine maximale Zeitspanne.
- Nun können die gewünschten Untersuchungen optimal durchgeführt werden.
- Falls die Stimmgabel über festgeschraubte Gewichte verfügt, dürfen diese nicht abgeschraubt werden. Die Frequenz ändert sich durch verschieben der Gewichte und eine genaue Einstellung kann nur durch den Hersteller vorgenommen werden.
- Nach Gebrauch darf das Instrument nicht in Sterilisatoren gereinigt werden. Zur Reinigung sollte die Stimmgabel mit einem trockenen oder leicht fettigen Tuch abgerieben werden.